

Mobilex "KAKADU" -suihkutuoli

Tuotenumero 302015, 302018, 302019 & 302020

Käyttöohjeet



Valkoinen runko
24" renkaat pikalukituksella

Perusmalli
lukittavilla
5" pyörillä



Irrotettava
ja
säädettävä
jalkalauta.



Pehmeä
PU-istuin &
suoja alusastialla



CE

1. Yleistiedot

Tässä käyttöohjeessa on kuvaus lääkinällisestä välineestä ja tärkeitä ohjeita tuotteen oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Ennen käyttöä on tärkeää lukea tämä käyttöohje huolellisesti. Erityisen tärkeitä ovat turvallisuutta koskevat vaatimukset ja niiden noudattaminen. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja varaamme oikeuden ilman erillistä ilmoitusta muuttaa tuotteiden spesifikaatioita ja toimintoja.

Välineen käyttötarkoitus

Tämä Mobilex-tuote on lääkinällinen väline, joka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan istumisen tukena henkilöille, jotka tarvitsevat tällaista apua kylpemisen, suihkun ja ulostamisen aikana. Se on myös mahdollinen kuljetusväline potilaiden siirtämiseksi kylpyhuoneisiin/WC-tiloihin ja niistä pois. Väline toimii ihmisen perustarpeiden täyttäjänä, ja pystyy helpottamaan sekä fyysisesti rajoitteen käyttäjän ja avustajan elämää. Väline on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Sitä voidaan kuormittaa korkeintaan 150 kg:n painolla. Kaikenlainen muu käyttö on kielletty.

Mikäli teillä on kysyttävää, kääntykää jälleenmyyjän tai suoraan Mobilex A/S:n puoleen.

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660
Skanderborg
Denmark

Phone: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
Email: info@mobilex.dk

2. Turvavaatimukset

- Varmista, että kaikki välinettä käyttävät henkilöt ovat lukeneet tämän käyttöohjekirjasen. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista ja/tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
- Tuotetta tulee käyttää vain sen ollessa moitteettomassa kunnossa.
- Mikäli vikoja tai häiriöitä ilmenee, tulee ottaa välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
- Noudata tuotekilvessä ilmoitettuja tietoja.
- Käytä tuotetta ainoastaan kuvattuun käyttötarkoitukseen.
- Vältä rakenteellisten muutosten tekemistä välineeseen ilman valmistajan kirjallista hyväksyntää tällaisille muutoksille.
- Erilaisten välineeseen tehtävien mahdollisten säätöjen tekemisen aikana on varottava sormien tai muiden ruumiinosien joutumista välineen liikkuvien osien väliin.
- Välinettä tulee käyttää ainoastaan tukevalla alustalla.
- Kaikkien pyörien on oltava kosketuksissa alustaan aina käytön aikana. Näin varmistetaan välineen kunnollinen tasapaino ja estetään onnettomuuksia.
- Kun välinettä käytetään sen ollessa liikkumattomana, on jarrut lukittava päälle.
- Välinettä ei saa kuormittaa yli 150 kg:n kuormalla.
- Väline on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa ja tasaisilla alustoilla.
- Pidä aina vakaa istuma-asenti välinettä käyttäessäsi. Käyttäjää ei saa jättää välineeseen ilman valvontaa. Poista reiän suojus vain kun tuolia käytetään ulostettaessa.

3. Kuvaus

Tuotekuvaus

The ""Kakadu"-tuolilla on kaikki tavanomaisen suihkutuolin perusominaisuudet: alusastia, pysäköintijarrut, irrotettavat jalkatuet, korkeussäädettävät käsinojat jne. Se on suunniteltu henkilöille, jotka edellyttävät istumatukea kyvyssä ja suihkussa käydessään. Tuoli on valmistettu miellyttävästä jauhepinnoitetusta teräspuutkesta, ja on korroosiota kestävä. Asentaminen ei edellytä työkaluja. Tuolin osat toimitetaan pahvilaatikoissa muutamiin elementteihin jaettuna kuljettamisen helpottamiseksi.

Laatikoiden sisältö:

- ✓ 1 varsinainen runko istuimella ja 1 irrotettava selkänojakehikko käsinojilla
- ✓ 2 irrotettavaa jalkatukea
- ✓ 4 irrotettavaa pyöräyksikköä, jotka koostuvat pyörästä, jarrusta ja asentamiseen tarkoitettua pystypuutkesta
- ✓ 4 pulttia ja 4 mutteria pyörien kiinnittämistä varten
- ✓ 1 alusastia ja 1 PU-kansi istuimen keskiaukolle
- ✓ Tämä käyttöohje



Kokoaminen

Välineen kokoaminen ja asentaminen on helppoa yllä olevan kuvan avulla. Suosittelemme seuraavaa toimintajärjestystä:

- Ota aluksi kaikki tuolin osat pois laatikosta ja tarkista yllä olevan luettelon avulla, ettei mitään puutu. Mikäli tällöin havaitaan jonkin osan puuttuvan tai olevan viallinen, ei asentamista tule jatkaa, vaan on välittömästi otettava yhteys tuolin toimittaneeseen tahoon.
- Aseta runko ylösalaisin lattialle. Rungon pystyputkien päissä näkyy neljä reikää.
- Työnnä pyörän asennusputki rungon kuhunkin alaholkkiin. Tuolin rungossa ja pyörän asennusputkessa on molemmissa on kaksi porausreikää (A & B) (kuvassa esitetyllä tavalla). Säädä pyörän pystyputki asentoon, jossa jokin siinä olevissa rei'istä osuu johonkin rungon reikään. Tämän avulla on mahdollista säätää tuolin istuinkorkeus kolmelle eri korkeudelle (2,5 cm:n askelin). Kun haluttu asento on saavutettu, työnnä kiinnityspultti molempien reikien läpi ja kiristä mutterilla putken vastakkaiselta puolelta. Säädä kaikki 4 pyörää aina samalle korkeudelle. Varmista pyörien kunnollinen lukittuminen vetämällä niitä ylöspäin. Niiden ei tulisi päästä liukumaan eikä heilumaan.
- Käännä runko nyt oikeinpäin siten kuin se seisoo pyöriillään. Ennen asennuksen jatkamista tulee kaikki pyöränjarrut kytkä päälle siten, ettei tuoli pääse liikkumaan (ks. Toiminnan kuvaus –kappale).
- Liu'uta selkänöjakehikon putkien päät kahteen asennusreikään, jotka sijaitsevat rungon yläosassa takana. Kiristä pultit rungon molemmin puolin siten, että selkänöja on tukeva ja jäykkä.
- Pane kansi alusastian päälle. Työnnä se istuimen alla oleviin kiskoihin. Tämä tulee tehdä takaapäin tuolin etupuolta kohden. Kun alusastia on paikallaan, peitä istuimen keskiaukko PU-kannella.
- Nyt voidaan kiinnittää jalkatuet. Aseta jalkatuen yläpää rungon päällä sen etuosassa sijaitsevaan reikään. Jalkatuen tulisi tällöin suuntautua ulospäin. Käännä jalkatukea, kunnes se lukittuu etumaiseen asentoonsa. Toista samat toimenpiteet toisen jalkatuen kanssa.



4. Toiminnan kuvaus

- Jarrut kytetään päälle painamalla varpailla polkimia, jotka on kiinnitetty kunkin pyörän taakse. Jarrut otetaan pois päältä polkimia ylös nostamalla, kunnes ne vapautuvat lukituksesta.
- Jarrut tulee aina kytkä päälle kun tuolia ei aiota siirtää. Tuolia ei milloinkaan saa jättää paikalleen lukitsematta, kun joku istuu siinä! **Tuolia ei milloinkaan saa jättää kaltevalle alustalle, ellei jarruja ole kytketty päälle!**
- Jalkatukien pituutta voidaan säätää käyttäjän pituuden mukaiseksi. Avaa jalkatuen pituussäädön pultti ja siirrä jalkatuki haluttuun kohtaan. Kiinnitä jalkatuki sitten uudelleen tukevasti pultin avulla.
- Alusastiaa tulisi käyttää vain sellaisten henkilöiden tapauksessa, joilla on vaikeuksia käyttää tavallisia WC-tiloja. Alusastian käyttäminen edellyttää istuimen keskiaukon päällä olevan kannen ja alusastian kannen poistamista. Kun toimenpide on suoritettu, kansi pannaan alusastian päälle ja astia vedetään pois tuolin alta. Astia tyhjennetään ja pestään ennen asettamista takaisin istuimen alle. Lopuksi istuimen keskiaukko peitetään kansikappaleella.
- **Alusastiaa ei milloinkaan saa jättää tyhjentämättä tai pesemättä.**
- Jalkatuen avaamiseksi lukituksesta ja irrottamiseksi painetaan lukitusvipua, jalkatukea käännetään ulospäin ja sen jälkeen vedetään ylöspäin irti tuolista. Tämä toiminto yhdessä korkeussäädettävien jalkalautojen kanssa on avuksi käyttäjän siirtyessä tuoliin ja siitä pois, ja käyttäjän kehon kaikkien osien peseminen on helpompaa suihkussa jalkatukien ollessa käännettynä sivuun tai irrotettuna.

- Tuolia ei saa milloinkaan siirtää jalkatukien ollessa irrotettuina, kun joku istuu siinä. Käyttäjän jalkojen on aina oltava jalkalautojen päällä tuolia siirrettäessä.
- Käsinoja voidaan helposti nostaa ylöspäin vetämällä. Takaisin alemmaksi ne saadaan yksinkertaisesti painamalla alas. Tämä ominaisuus on avuksi käyttäjän siirtyessä tuoliin ja siitä pois ja hänen pesemisensä yhteydessä.
- Tuolia ei milloinkaan saa jättää ilman valvontaa käsinojien ollessa käännettyinä ylös jonkun istuessa siinä.
- Tulee huomioida, että jalkatukia ja käsinoja ei ole suunniteltu kantamaan käyttäjän koko painoa, eikä niitä tule kuormittaa tällä tavoin.

Kuljettamista koskevia suosituksia (nostaminen ja kantaminen)

Suihkutuolia ei ole tarkoitettu usein tapahtuvaan kuljettamiseen. Mikäli tuolin kuljettaminen on tarpeen, suosittelemme sen purkamista asennusohjeisiin nähden käänteisessä järjestyksessä. Tuoli tulisi pakata tukevasti siten, ettei se pääse vahingoittumaan ajoneuvon äkillisten liikkeiden johdosta.

Mikäli koottua suihkutuolia on tarpeen kantaa, suosittelemme että jalkatuet irrotetaan ja suihkutuolia nostetaan rungon molemmilta puolilta alla olevassa kuvassa esitetyistä kohdista.




Kakadu-suihkutuolin nostokohdat

Lisävarusteet


Pienet takapyörät voidaan korvata kelausvanteilla varustetuilla suurilla 24":n pyörillä, joiden avulla käyttäjä voi itse ajaa tuolia. Tällaisten pyörien asentaminen edellyttää myös tyyppilisten pyörätuolin jarrujen asentamista. Kaikki tarvittavat osat sisältyvät lisävarustesarjaan nro. 302017.

Pyörien vaihtaminen:

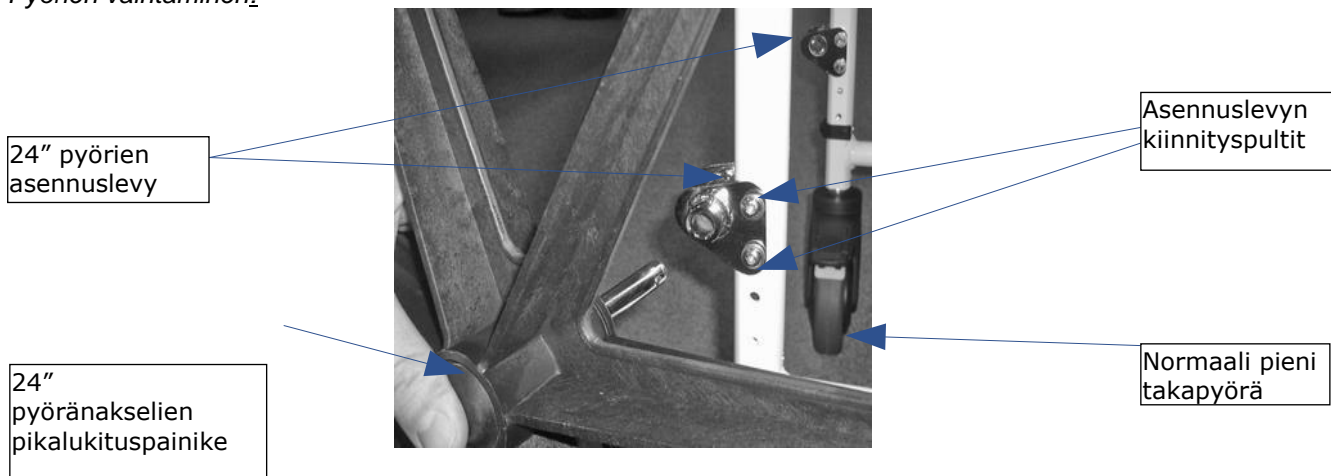

- Irrota kaksi normaalia takapyörää asennusohjeisiin nähden vastakkaisessa järjestyksessä.
- Sovita 24":n pyörien asennuskannatin sivurungon takimmaiseen pystyputkeen (yllä olevassa kuvassa esitetyllä tavalla).
- Putkessa on porausreiät, joiden avulla tuoli voidaan säätää eri istuinkorkeuksille. Valitse kaksi sopivaa reikää ja säädä asennuslevyä siten, että kiinnitysreiät ovat putken reikien kohdalla.
- Työnnä kaksi kiinnityspulttia reikien läpi ja kiinnitä prikka ja mutteri. Kiristä kiinnityspultit siten, että asennuslevy on tukevasti paikoillaan.
- Toista yllä mainitut vaiheet tuolin toiselle puolelle.
- Paina ison pyörän keskiössä olevaa pikalukituspainiketta. Työnnä pyörä asennuslevyn holkkiin. Vapauta painike.
- Varmista pyörien tukeva kiinnitys aina kokeilemalla vetää niitä irti.
- Pyörä irrotetaan painamalla pikalukituspainiketta ja vetämällä pyörä ulos kannatinholkistaan.
- Suurten pyörien asentamisen jälkeen saattaa olla tarpeen säätää pienten etupyörien korkeus edellä kuvatulla tavalla. Rungon alustan tulee aina olla alustaan nähden yhdensuuntainen.

Jarrun asentaminen:

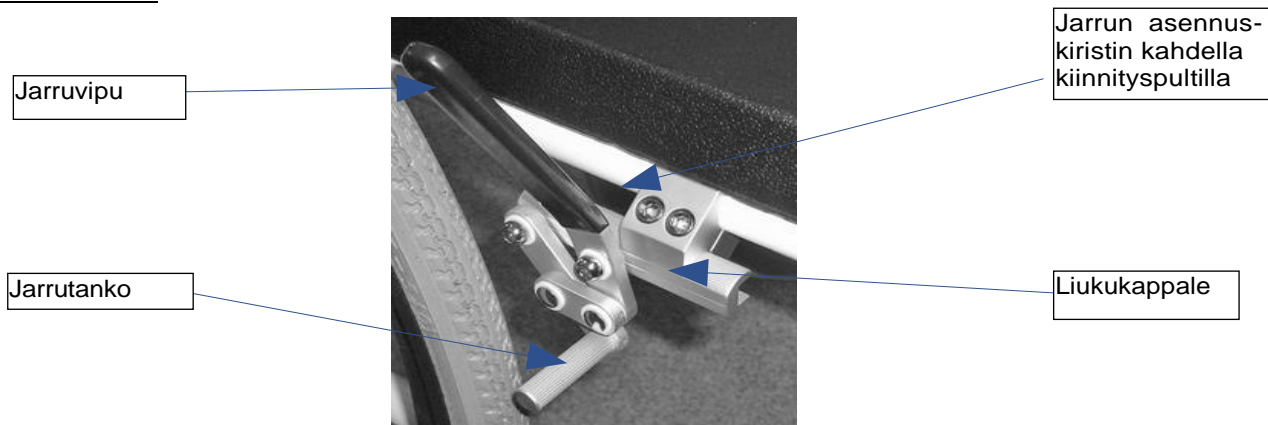


- 24":n pyöriille on asennettava tavanomaisen pyörätuolin pysäköintijarrut, sillä pyöriä ei ole varustettu omilla jarruilla.
- Jarrun asennussarja koostuu kiinnityskiristimestä, jarrumekanismista ja kahdesta kiinnityspultista.
- Työnnä jarrun liukukappale asennuskiristimen pienempään loveen.
- Aseta asennuskiristin vaakasuoraan sivurungon putkeen yllä olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.
- Siirrä liukukappaletta optimaalisen kohdan löytämiseksi jarrulle siten, että jarrun kytkeminen päälle on tarvittaessa vaivatonta, mutta renkaan ja jarrutangon välinen kitka riittää pitämään pyörätuolin tehokkaasti liikkumattomana.
- Kiristä jarru tukevasti paikoilleen kiinnityspulttien avulla.
- Toista yllä mainitut vaiheet tuolin toiselle puolelle.
- Jarrut kytketään päälle yksinkertaisesti jarruvipua eteenpäin työntämällä. Jarrut vapautetaan vipua taaksepäin vetämällä.

Kakadu	Pieni 302015	Standard 302018	Suuri 302019	XL 302020
<i>Istuimen leveys</i>	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm
<i>Istuimen syvyys</i>	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm
<i>Istuinkorkeus (säädettävä)</i>	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm
<i>Istuimen aukko</i>	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5
<i>Kulkukorkeus</i>	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm
<i>Kulkuleveys</i>	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm
<i>Kokonaisleveys</i>	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm
<i>Kokonaispituus</i>	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm
<i>Kokonaiskorkeus (säädettävä)</i>	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm
<i>Maksimikuormitus</i>	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg
<i>Paino</i>	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg

Tuotekilpi

Tuotekilpi sijaitsee rungon alla

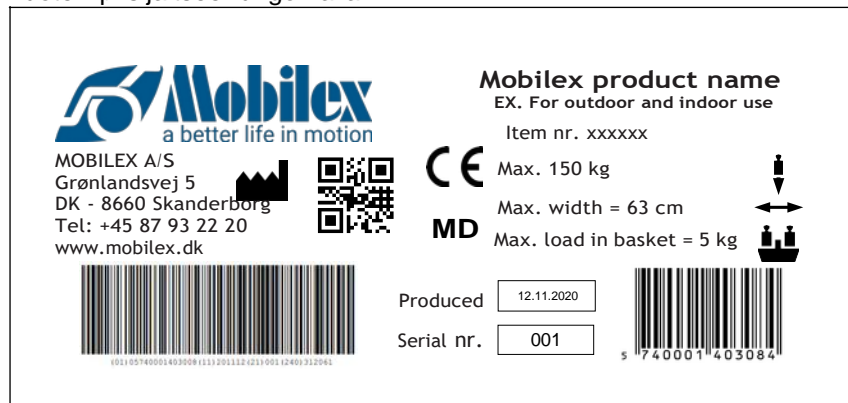

Esimerkki tuotekilvestä

5. Puhdistaminen ja kunnossapito

Normaali metalli- ja muoviosilla oleva lika voidaan poistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla ja sienellä tai pehmeällä rievulla. Varmista tuotetiedot ja käytä ainoastaan kaupallisia puhdistusaineita, jotka soveltuvat puhdistamiseen ja desinfiointiin (älä käytä valmisteita, jotka sisältävät alkoholia tai liuottimia tai hankaavia aineita).

Väline ei periaatteessa tarvitse huoltoa. Tukevasta rakenteesta ja kestävien materiaalien käytöstä huolimatta tuote on altis kulumiselle. Tästä syystä suositellaan tuotteen tarkistuttamista säännöllisin välein ammattitaitoisen huollon toimesta.

Suosittelemme tarkistamaan seuraavat:


- ✓ Tuotteen puhdistaminen ja desinfiointi
- ✓ Rungon/tuolin tarkistaminen taipumien, vaurioiden, kulumien ja korroosion varalta
- ✓ Kuluvat osat tarkistetaan ja vaihdetaan tarvittaessa
- ✓ Tuotteen yleinen kiristäminen

Suosittelun käyttöikä: Normaalista 10 vuotta, käytöstä riippuen.


Renkaiden puhdistaminen

Renkaat suositellaan puhdistettavaksi miedolla puhdistusaineella kuumassa vedessä. Voitele laakerit öljyllä säännöllisin väliajoin tai kun pyörät alkavat kitistä.


Varoitus

 Kun tuolia käytetään runsaasti kalkkia sisältävän veden kanssa, saattaa pyöränlaakereihin ja muihin liikkuviin osiin kertyä kalkkisaostumia. Tällaisissa tapauksissa voi olla tarpeen käyttää kalkinpoistoliuosta ja lisäksi voitelua.

Varoitus

 Tuolin käyttäminen klooria sisältävässä ympäristössä aiheuttaa erityisen voimakasta syöpymistä, eikä takuu ole tällöin voimassa.

Varoitus

 Huomio, että jos runko on taipunut tai rikkoutunut, tuotetta ei saa kierrättää, vaan se on vaihdettava.

6. Uudelleenkäyttö

Tuote soveltuu kierrätykseen. Tuote on tarkistettava kohdan 5 mukaisesti ennen kuin uusi käyttäjä ottaa tuotteen haltuunsa.

7. Tavallisimmat ongelmat ja ratkaisut

Oireet	Mahdollinen syy	Toimenpiteet
Tuoli ei ole tukeva eikä vaakasuorassa	Pyörät on asennettu eri korkeuksille	Säädä pyörät samalle korkeudelle
Pyörät eivät pyöri tasaisesti ja vaivattomasti	Pyörien ja pyöränhaarukoiden väliin on kertynyt likaa	Puhdista pyörien ja pyöränhaarukoiden välinen tila ylimääräisestä materiaasta

8. Tuotteen hävittäminen

Tuotetta ei voida jättää hävitettäväksi talousjätteen mukana, vaan se on vietävä paikalliselle kierrätysasemalle.

9. Takuehdot

Mobilex A/S tarjoaa 2 vuoden takuun valmistusvirheille. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti. Takuu ei kata normaalille kulumiselle alttiita osia, ellei kyseessä ole valmistusvirheen aiheuttama kuluminen. Mikäli

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg

www.mobilex.dk

vaurioita havaitaan, ottakaa yhteys jälleenmyyjään. Takuu ei kata kuljetuskustannuksia. Takuu ei kata loukkaantumista eikä muita vahinkoja, jotka mahdollisesti johtuvat tuotteen toimintahäiriöstä.



Doc

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE)

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, DK-8660 Skanderborg, Tanska,

vakuuttaa täten tuotteen

Mobilex "KAKADU" – suihkutuoli

Tuotenumero 302015, 302018, 302019 & 302020

olevan suunniteltu teknisen dokumentaation mukaisesti ja täyttävän seuraavat perustavanlaatuiset vaatimukset:

In case of unintended incidents or suspected faults, failures or defects of the product, the dealer or Mobilex A/S must be contacted /



EU2017/745 for Medical Equipment
(Lääkinnällisten laitteiden direktiivi)

Thomas Nygaard Christensen
Managing Director
Mobilex A/S
Skanderborg, 24-04-2021

Allekirjoitus

Sarjanumero:

