



KÄYTTÖOHJEET

RehaPro siirto- ja talutusvyö PD-1

Tuotekuvaus

Siirto- ja talutusvyötä käytetään apuvälineenä henkilön siirtämiseen. Vyö kiinnitetään huolellisesti avustettavan tai avustajan vyötärön ympärille lukitsemalla vyössä oleva kiinnitystarra ja lukitusolki. Vyön pituus säädetään sopivaksi, jonka jälkeen vyön tarraosa ja lukitusolki kiinnitetään ja kiristetään. Siirto- ja talutusvyö lisää turvallisuutta siirron aikana.

Ominaisuudet:

Useita tukevia talutuskahvoja pysty- ja pituussuunnassa, jotka takaavat hyvän otteen

Olemassa useita eri kokoja ja malleja, (ks. taulu alla)

Sisäpuoli on liukumaton materiaalia

Tarrakiinnitys ja lukitusolki

Koko	Vyötärön ympäryys, cm	Kahvat
S/1	55-95	7
M/2	65-115	9
L/3	95-155	11
XL/4	110-170	13

Tekniset tiedot

Ulkopinta: PU-päällystettyä nailonia

Pehmuste: Polyetyleenivaahtoa

Kahvat: 100 % polyesteriä

Kahvojen pehmuste: Polyetyleenivaahto

Sisäpinta: PU-päällystettyä polyesteria

Maksimikuormitus 200 kg

Tuote on CE-merkitty

Pesu- ja hoito-ohjeet:

Siirto- ja talutusvyö voidaan pestä 80 asteessa. Voidaan puhdistaa desinfiointiaineella.

Varoitus: Älä käytä huuhteluainetta.



Valmistaja: Closed Joint-Stock Co. "Ortopagalba"
Raudondvario pl. 164, LT-47182 Kaunas, Lithuania
Tel. +37068364008

www.ortopagalba.com

